

# CE 0482

00990474 Stand der Information: 2013-01

## Gebrauchsanweisung

### Anwendungsgebiet:

Zur Spülung der Augen, des Bindehautsackes sowie der Haut nach Verätzungen durch Säuren oder Laugen sowie durch Pfefferspray, CS-Kampfgas oder Tränengas.

Grundsätzlich gilt: suchen Sie so schnell wie möglich einen Arzt auf

### Anwendung:

1. Drehverschluß öffnen und entfernen
2. Auge vorsichtig mit der Hand öffnen
3. Auge vorsichtig spülen
4. Spülvorgang solange fortführen, bis alle schädlichen Stoffe ausgespült sind
5. Bei Bedarf weitere Flaschen verwenden

### Hinweise:

- Produkt ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Nicht verwenden, wenn der Originalitätsverschluss oder die Flasche beschädigt ist
- Produkt dient ausschließlich der Ersten Hilfe

**Zusammensetzung:** (100 ml Lösung enthalten):  
Natriumdihydrogenphosphat 2 H<sub>2</sub>O 440 mg,  
Natriummonohydrogenphosphat 12 H<sub>2</sub>O 4040 mg,  
Wasser für Injektionszwecke


# Isogutt®

## Augenspülung

sterile Phosphatpufferlösung

## eye wash

sterile phosphate buffer solution

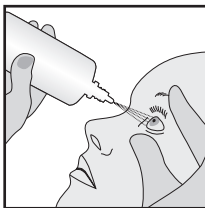

250 ml



**STERILE A**

## Instructions for use



PZN (AT) - 3870871

### Area of application:

For rinsing the eyes, the conjunctival sac, and the skin after chemical burns caused by acids or bases as well as by pepper spray, CS gas or tear gas.

In general: consult a doctor as fast as possible

### Instruction for Use:

1. Open and remove the cap
2. Open the eye carefully by hand
3. Rinse the eye carefully
4. Continue rinsing until all harmful substances are washed out completely
5. Use additional bottles if required

### Notes:

- Product is intended for single use
- Do not use after the expiry date
- Keep out of reach of children
- Use sealed and undamaged bottles only
- The product is for first aid only



Optima Pharmazeutische GmbH  
Wittibsmühle 5  
D-85368 Wang  
[www.optimapharma.de](http://www.optimapharma.de)



PZN (DE) - 9300011



Lot