

500 ml

**Notfall-
Augen-
spüllösung**



Optima Pharmazeutische GmbH

D-85361 Moosburg/Wang

www.optimapharma.de

Made in Germany

1000 ml Lösung enthalten Natriumchlorid 9 g.
Weiterer Bestandteil: Wasser für Injektionszwecke.

Zum Spülen der Augen als Erste-Hilfe-Maßnahme, zum Heraus-
spülen von Chemikalien (z. B. bei Verätzungen) und Fremd-
körpern (z. B. Splitter, Staubpartikel) aus dem Auge.

Anwendungshinweise:

Die Flasche durch Drehen der farbigen
Kappe öffnen.

Augenlid mit Daumen und Zeigefinger
(ggf. durch Hilfsperson) auseinanderziehen.
Mit leichtem Druck auf die Flaschenwandung
solange spülen, bis die Flasche leer ist.
Lidspalte während des gesamten Spülvor-
ganges unbedingt geöffnet halten.
Bitte solange spülen, bis die Flasche
komplett entleert ist.



**Isogutt® akut
MP**

Isotonische
Natriumchloridlösung



Gebrauchsanweisung beachten!

Nicht anwenden bei perforierenden (offenen)
Augenverletzungen. Nach der Augenspülung
unbedingt für ärztliche Behandlung sorgen!
Nehmen Sie Kontaktlinsen vor der Anwendung
von Isogutt akut MP heraus.

Flasche zum Schutz vor Beschädigung im
Umkarton aufbewahren.

1518.0

Sterile isotonische
Augenspüllösung

CE 0482



STERILE A

LOT



005-00720