



1 Testkit | PZN: 13512724

Selbsttest zur Messung des Fettsäure-Profils:

- Omega-6/3 Verhältnis
- Omega-3 Index
- Anteil an Transfettsäuren
- 26 Fettsäuren

Analyse:

- Geprüfte und dokumentierte Analyse-Methode mit hoher Stabilität der Analyse-Werte (approximiert Erythrozyten-Werte)
- Ausgeführt beim europäisch führenden unabhängigen Speziallabor (Omegetrix) für Fettsäure-Analysen.
- Ausführlicher Befund als Grundlage einer medizinischen Ernährungsberatung
- Einfache Blutentnahme durch Fingerbeere
- Omega-6/3-Verhältnis
- Omega-3-Index
- Anteil an Transfettsäuren
- 26 Fettsäuren

Der individuelle Bedarf an Omega-3 lässt sich mit Hilfe des Selbsttests zur Analyse des Fettsäure- und Omega-Profils (NORSAN Analyse) belegen. Mit einigen Tropfen Blut aus der Fingerbeere wird Ihr Fettsäure-Profil analysiert und Sie erhalten unter anderem Informationen zu: Anleitung:

Omega-3 Index: Gibt den Anteil der marinen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA im Verhältnis zu den gesamten Fettsäuren an. NORSAN empfiehlt einen Anteil von über 8%.

Omega-6/3-Verhältnis: Weist auf das Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren hin, die bei der Entzündungsbildung und -hemmung entscheidend mitwirken. Ein zu hohes Omega-6/3-Verhältnis (Omega-3-Ratio) führt zu einem unerwünscht hohen Entzündungsniveau im Körper.

Transfett-Anteil: Transfette sind Fettstoffe, die nicht natürlich in den Körper gehören. Transfette schaden den Zellen. Der Transfett-Anteil sollte niedrig sein. Es wird empfohlen, dass die industriellen Transfette weniger als 0,50% der gesamten Fettsäuren ausmachen sollen.

NORSAN Fettsäure-Analyse Inhalt

- Bestellanforderung für die Blutanalyse
- Blutentnahmeset bestehend aus:
 - Nadel
 - Rücksendeumschlag
 - Folienbeutel
 - Anleitung zur Blutentnahme
 - Test-Papier

SO EINFACH GEHT'S:



Test-Kit bestellen

Bestellen Sie alles was Sie zum Bestimmen der Fettsäure-Werte Ihrer Patienten brauchen.



Blutentnahme

Mit der beigegefügt kleinen Nadel in den Finger pieken und 2 Blutstropfen auf das Testpapier bringen.



Per Post verschicken

Das Testpapier per Post verschicken. Vorfrankierter Umschlag befindet sich im Test-Kit.



Befund erhalten

Nach ca. 1-2 Wochen wird Ihnen das Analyse-Ergebnis geschickt und Sie können es online abrufen.



Omegetrix - Speziallabor für Fettsäure-Analysen

Omegetrix ist das führende unabhängige Speziallabor für Fettsäure-Analysen in Europa und gewährleistet hohe Qualität und Stabilität bei den Messungen.

Empfehlung von NORSAN:

- Omega-6/3-Verhältnis zwischen 2,5:1 bis 1:1
- Omega-3-Index über 8%
- Anteil an industriellen Transfettsäuren unter 0,5%

