

DE

ZUSAMMENSETZUNG

Natriumchlorid, Borsäure, Natriumborat, Rosenwasser, gereinigtes Wasser q.s. ad 5 ml.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Xailin Wash ist eine sterile Augenspüllösung in Einzeldosen von 5ml.

ANWENDUNGSGEBIETE

Xailin Wash eignet sich zur:

- Augenspülung bei der Behandlung oberflächlicher Reizungen der Augenlider und des Augapfels: Die Augenspülung ermöglicht die Beseitigung von Fremdkörpern, die das Auge reizen, wie Sand, Fliegen, Staub, Pollen, Schminkreste... und lindert die Beschwerden.
- Augenspülung bei der unterstützenden Behandlung infektiöser, allergischer oder entzündlicher Erkrankungen von Augenlidern, Bindehaut und Hornhaut.
- Täglichen und postoperativen Augenhigiene (Kinder und Erwachsene).
- Xailin Wash trägt zur Befeuchtung der Augen bei.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Nicht zur Injektion, nicht schlucken.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Wenn Sie Kontaktlinsenträger sind, können Sie dieses Produkt verwenden; die Kontaktlinsen müssen vor der Augenspülung jedoch herausgenommen werden.

Eine Einzeldosis kann zur Behandlung beider Augen verwendet werden.

Vermeiden Sie eine Berührung des Auges oder der Augenlider mit der Flaschenspitze.

Die Wirkung von Augentropfen oder Augensalbe kann durch gleichzeitige Anwendung der Augenspüllösung beeinträchtigt werden. Ein zeitlicher Abstand von 10 Minuten sollte zwischen jeder Anwendung von Augenmitteln eingehalten werden und es sollte immer mit der Augenspüllösung Xailin Wash begonnen werden, außer auf spezielle Anordnung Ihres Arztes.

Bei neu auftretender, anhaltender oder schlimmer werdender Reizung, bei übermäßigem Tränenfluss oder bei Sehstörungen beenden Sie die Anwendung der Lösung und suchen Sie rasch einen Arzt auf.

AUFBEWAHRUNG

Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.

Die Einzeldosis nach dem Gebrauch sofort verwerfen.

Eine bereits geöffnete Einzeldosis nicht wieder verwenden.

Da dieses Medizinprodukt kein Konservierungsmittel enthält, würde eine Wiederverwendung zu der Gefahr führen, eine verunreinigte Lösung anzuwenden.

Vor dem Öffnen die Einzeldosen bei Raumtemperatur lagern.

WIE WIRD XAILIN WASH ANGEWENDET?

2 bis 8 Augenspülungen pro Tag.

Achten Sie im Vorfeld unbedingt darauf, dass die Einzeldosis nicht bereits verwendet wurde oder beschädigt ist.

Waschen Sie sorgfältig Ihre Hände, bevor Sie die Augenspülung durchführen.

Trennen Sie dann eine Einzeldosis vom Riegel ab und öffnen Sie sie, indem Sie den oberen Teil abdrehen.

Die Spülung erfolgt direkt mit einem Strahl durch leichtes Drücken auf die Flasche. Es wird empfohlen, das untere Lid nach unten zu ziehen, mit Blick nach oben, und dann das obere Lid nach oben zu ziehen, mit Blick nach unten, sodass die Lösung auf der gesamten Augenoberfläche gut verteilt wird, um Fremdkörper, die das Auge reizen, zu entfernen, das Volumen des Tränenfilms zu erhöhen und das Gewebe zu befeuchten.

Xailin Wash ist ein Medizinprodukt der Klasse I Sterilprodukte.

Datum der CE-Kennzeichnung: 18. April 2006. Stand der Information: November 2012.

Xailin ist eine Marke von Nicox

 Vertrieb durch Nicox Pharma, CS 10313, Sophia Antipolis,
06560 Valbonne, France - nicoxpharma@nicox.com

 Laboratoire Unither, Espace Industriel Nord,
151 Rue André Durouchez, CS 28028, 80084 AMIENS Cedex 2 France

